Инструкция по установке программного обеспечения, предоставленного для проведения экспертной проверки

Оглавление

Установка мобильного приложения из АРК-файла	2
Требования к аппаратному обеспечению	2
Установка и запуск приложения	2
Ограничение установки системой	4
Установка мобильного приложения из магазина приложений Play-маркет	5
Тестовый аккаунт для проверки мобильного приложения	6
Веб-приложение	еделена.
Сервер Системы	7
Если возникли сложности или вопросы	8

Установка мобильного приложения из АРК-файла

Требования к аппаратному обеспечению

- Смартфон с OC Android не ниже 8.0
- Доступ в интернет
- От 100Мб доступного дискового пространства
- Камера (необходима для функционала сканирования QR-кодов и создания фотографий вещей и питомцев, принадлежащих пользователю)

Установка и запуск приложения

Необходимо скачать АРК-файл по предоставленной ссылке. Приложение скачивается не из магазина приложений, поэтому система может предупредить о рисках (*см. рис. 1*). В этом случае необходимо подтвердить скачивание.



Рис. 1. Предупреждение о рисках (скачивание приложения не из магазина приложений)

Рис. 2. АРК-файл загружен. Предложение произвести его установку

После скачивания необходимо установить приложение (*см. puc. 2*), нажав на АРК-файл или выбрав одно из предложенных действий (например, «*Открыть*» или «*Установить*»).

Также, может потребоваться проверка приложения средствами ОС Anroid (*см. рис. 3*). Необходимо дать на нее согласие.

Система сообщит о завершении установки приложения (*см. рис. 4*). После установки, иконка приложения появится среди списка других установленных приложений.

Обратите внимание: приложение имеет поддержку английского языка. Поэтому, значок приложения, его название и язык интерфейса после запуска зависят от установленного на устройстве языка. Для отображения русского языка на устройстве так же должен русский язык использоваться в качестве основного.



Рис.3. Проверка пройдена. Предложение установить приложение

Рис. 4. Вид сообщения об успешной установке приложения

Ограничение установки системой

По-умолчанию, система Android имеет ограничение на установку приложений из внешних источников (не из магазина приложений).

Если после запуска установки система ограничила его установку (*см. рис.5*), необходимо предоставить необходимые разрешения (*см. рис.6*).



Рис.5. Система по-умолчанию блокирует установку приложения не из магазина приложений

Рис. 6. Вид экрана предоставления разрешений на установку приложений не из магазина приложений (может отличаться, в зависимости от версии OC Android)

Установка мобильного приложения из магазина приложений Play-маркет

Установка мобильного приложения на Android-устройство производится со страницы приложения в магазине приложений Play-маркет или RuStore:

Play-маркет

«Программатор врача»: <u>https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.promtec74.docprogrammer</u> «Пульт пациента»: <u>https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.promtec74.pacientconsole</u>

RuStore

«Программатор врача»: <u>https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.promtec74.docprogrammer</u> «Пульт пациента»: <u>https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.promtec74.pacientconsole</u>

Переход на страницу приложения в магазине приложений производится одним из следующих способов:

- По прямой ссылке, размещенной на главной странице сайта сервиса: <u>https://элси-10.pф</u>
- При поиске приложения в магазине приложений Play-маркет / RuStore
- По ссылке из маркетинговых материалов

15:27 🖄 🕲 🔺 🗹	× 🛜 🐻 4						
÷	Q :						
ООО "Медиции	ЦИЕНТА нские системы"						
Удалить	Обновить						
Можно установить на	другие уст 🔿						
Samsung SM-T505 Планшет	Установить						
Google Pixel 6 Установлено							
Что нового • Последнее обновление: 21 мар. 20	→						
Накопительный пакет исправ. направленных на повышение приложения	пений и дополнений, производительности						
🗸 Телефон 🔲 Устройст	во Chromebook						
Оценить приложение Поделитесь своим мнением							

Напишите отзыв							
•							

Рис. 7. Внешний вид страницы приложения в магазине приложений Play-маркет

Тестовый аккаунт для проверки мобильных приложений

Для проверки приложения можно использовать тестовый аккаунт. Для доступа в него необходимо при запуске приложения ввести учетные данные аккаунта (*см. рис. 8*), либо выбрать блок «Авторизоваться» в разделе «Профиль» в будущем (*см. рис. 9*)

Приложение «Программатор врача»

- Email: sandbox@fastdev.info
- пароль: 2705

Приложение «Пульт пациента»

- Номер медицинской карты: 1234
- пароль: 2705

15:38 🖉 🖪 🕲 🛦 · 🛛 🖸	< 🤶 📵 · 4	15:38 ½	₫ ◀ ⊚ ▲ ·		× 🔶 🐻	D : f
		Профиль				
Введите данные для вх Номер медицинской карты	(oga		Автори: После ав Заших се их прохож сохраняп будут до вамене уч	зоваться торизации да ансов и истор кдения будут пься на сервер ступны Вам д стройства	нные рия ре. Они аже при	>
Введите номер карты Пароль Введите пароль Продолжая использовать приложени	کو ue,	ر بر ۲ ۹ ۹ ۹	Обмен с истрой Обмен до частрое результа устрой Bluetooth	анными с ством врача анными пациен к сеансов и атов их прохож иством врача ч	нта, кдения через	>
обработку Ваших персональных дан в соответствии с нашей Политико конфиденциальности	аных й	? Справочная информация			оция	>
		ē 4	Докумен	тация		>
Boŭmu		T	Гемная г Если отк	пема мючено то те	рмноя	
Продолжить без авториза	цuu	o () Cear	О	Э Устройство	Профил	Ь
< (i)			•	۲		

Рис. 8. Внешний вид главного экрана с призывом авторизоваться («Пульт пациента»)

Рис. 9. Вид экрана раздела «Профиль» («Пульт пациента»)

Сервер Системы

ПО сервера Системы для проведения экспертной проверки развернуто по адресу: <u>https://sandbox.элси-</u> <u>10.pф</u>

Доступ к панели управления сервером осуществляется по адресу: <u>https://cv3650537.vps.regruhosting.ru:1500/</u>

Учетные данные для доступа представлены в «Инструкции по эксплуатации сервера Системы (полная версия)», представленной в Заявлении о включении сведений о программное обеспечение в реестр в разделе «5/13 Документация на программное обеспечение» (Документация, содержащая информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра программного обеспечения, предоставленного для проведения экспертной проверки – «Инструкция по эксплуатации сервера Системы (полная версия)»).

Также, по вопросам предоставления доступа и комментариев к ПО сервера Системы, просьба обращаться по следующим контактам:

Еремеев Роман Александрович Тел. / Телеграм +7-921-254-28-32 Email: <u>info@fastdev.info</u>

Если возникли сложности или вопросы

При возникновении сложностей или вопросов при установке или проверке приложения, просьба обращаться по следующим контактам:

Еремеев Роман Александрович Тел. / Телеграм +7-921-254-28-32 Email: <u>info@fastdev.info</u>